


Bedienungsanleitung

Schieber - Hilfsmittel für die Rückenbehandlung nach Dorn

Bestimmungsgemäße Verwendung: Einrichten der Wirbel nach Dorn

Das Produkt darf nur von entsprechend geschultem und ausgebildetem Personal angewandt werden. Eine fundierte Ausbildung ist für die Anwendung Voraussetzung und erforderlich.

Der Hersteller, Vertrieb oder Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße und falsche Handhabung.

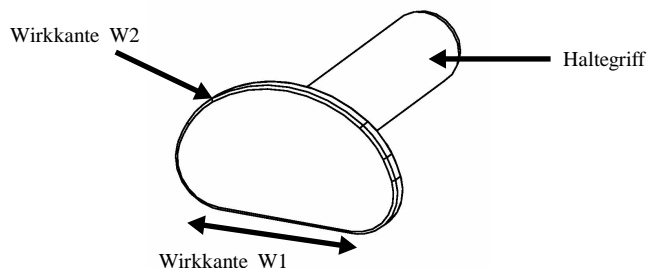

Der Schieber zum Einrichten der Wirbel nach Dorn ist ein Hilfsmittel, das den Behandler und dessen Daumen entlastet, mit dem normalerweise der Druck beim Einrichten der Wirbel nach Dorn ausgeübt wird.

Ein einzelner Wirbel kann mit der Wirkkante W2, anstatt dem Druck des Daumens, eingerichtet werden.

Außerdem kann mit der Wirkkante W1 des Schiebers das ganze Kreuzbein oder mehrere Wirbel durchbewegt und eingerichtet werden, was mit dem punktuellen Druck des Daumens nicht möglich ist.

Als weiterer Vorteil kann der Druck auf eine größere Fläche verteilt werden, was von den Patienten angenehmer empfunden wird.

Nach dem Gebrauch ist der Schieber zu reinigen und zu desinfizieren (mit allen gängigen und zugelassenen Wisch- und Sprühdessinfektionsmitteln möglich), oder im Wasserdampfsterilisationsverfahren zu sterilisieren (max. 100° C - gut auskühlen lassen). Zur Pflege den Schieber nach dem Desinfizieren oder Sterilisieren mit Vaseline polieren.

Das Produkt ist lebensmittelecht und umweltgerecht gefertigt und somit allergiearm. Die verwendeten Materialien und Farben enthalten **keine** Schwermetalle und Lösungsmittel. Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, oder UV-Bestrahlung aussetzen, da die Farben sonst verblässen.



Hersteller:

Natural Spinal Care ®
Römerstr. 56
76448 Durmersheim

Tel.: 07245/93719-5
Fax: 07245/93719-4

www.breuss-dorn-shop.de

Garantie:

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum und gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten. Darüber hinaus besteht Gewährleistung im Rahmen der gültigen, gesetzlichen Bestimmungen. Als Nachweis für das Kaufdatum gilt der Kaufbeleg.

Die Garantie kann nur vom Erstbesitzer in Anspruch genommen werden und ist nicht übertragbar.

Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf Material und Produktfehler.

Eine Garantie gilt nur für Produkte an denen der Besitzer keine Änderungen vorgenommen hat.

Der Hersteller ist ausschließlich für Schäden an dem vom Hersteller produzierten Produkt haftbar.

Bei Defekten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wenn er das Problem nicht beheben kann schickt der Fachhändler, oder Sie, das Produkt einschließlich einer eindeutigen Reklamationsbegründung und dem Kaufbeleg an den Hersteller zurück.

Es besteht kein Anspruch auf Umtausch, oder Rücknahme.

Reparaturen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiefrist.

Eine Garantie tritt nicht ein, wenn:

- dem Hersteller das Produkt nicht mit dem Kaufbeleg vorgelegt wird.
- die Defekte durch unsachgemäße Benutzung oder mangelnde Pflege, abweichend von den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
- Reparaturen von dritten am Produkt ausgeführt wurden.
- von normaler Abnutzung die Rede ist, die bei täglicher Benutzung zu erwarten ist.
- der Defekt durch Vernachlässigung entstanden ist.
- das Produkt beschädigt ist.
- die vorgenannten Garantiebestimmungen auf andere Art und Weise nicht erfüllt werden.

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für evtl. Rückfragen und Garantieansprüche auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Produktes ist die Bedienungsanleitung mit Auszuhändigen.

Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz übereinstimmt. Mit dem CE-Zeichen versehene Medizinprodukte sind für den europäischen Markt bestimmt.

